


zur Rose



**eContrôle de température –
vérifier et documenter
en quelques clics seulement**

eContrôle de température – un processus d'assurance qualité optimisé et rapide

La numérisation permet de gagner du temps, y compris lors du contrôle de la température. Zur Rose et BlueCare ont développé ensemble une application en ligne pour le contrôle électronique de température. L'application web vous permet, en quelques clics, de contrôler et de consigner vos données de température tel qu'exigé par les autorités. Dès que vous aurez installé vos thermomètres compatibles de Hediger Lab AG, vous aurez accès à vos données et à votre documentation via votre identité HIN.

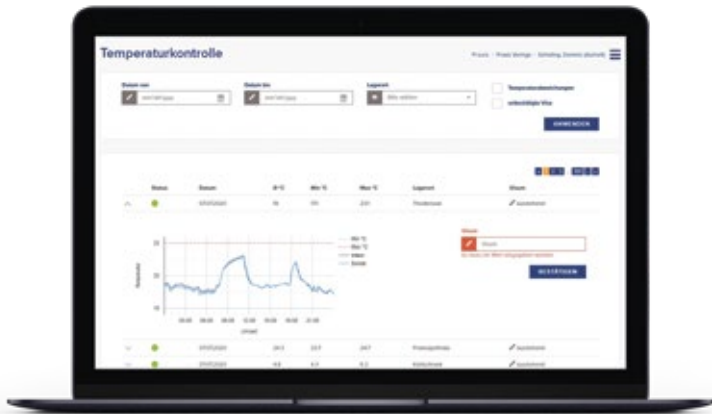

Signer le protocole journalier et hebdomadaire, documenter et non-respect des limites

Pour chaque capteur positionné sur vos lieux de stockage, vous pouvez enregistrer les plages de température correspondantes.

Plages standards

Réfrigérateurs à médicaments:	2° à 8°
Pharmacie du cabinet médical / stockage des médicaments:	15° à 25°

Contrôle et documentation numériques

Dès l'installation de l'enregistreur de température, les protocoles journaliers et hebdomadaires de vos lieux de stockage sont traités automatiquement et de manière compréhensible. Pour le contrôle et la signature de vos protocoles, vous recevrez chaque fois un lien par e-mail. Ce lien vous dirige vers l'aperçu de vos protocoles. Pour la mise en service et les réglages de votre dépôt eTemp, notre support eTemp gratuit est à votre disposition via le 0800 525 001 ou kunden-dienstaezte@zurrose.ch.

Aperçu des protocoles de températures

Pour éditer les protocoles, double-cliquez dessus (voir l'illustration à gauche).

Les valeurs limites ne sont pas respectées lorsque les températures mesurées sont en dehors de la plage standard. Celles-ci sont indiquées dans l'aperçu par un symbole rouge et doivent être visées avec une mesure prise. Une fois le visa appliqué sur le protocole, ce dernier ne peut plus être modifié. Cela permet de garantir l'assurance qualité exigée par les autorités.



Enregistreurs de température compatibles – thermomètre de Hediger Lab AG



Unité principale – Hub enregistreur de données de température

- Raccordement pour plusieurs capteurs
- Distance entre les capteurs max. 50 m, avec salle de radiologie entre les deux max. 25 m (ne s'applique pas quand il y a plusieurs étages)
- L'installation avec raccordement au LAN du cabinet est disponible à distance
- Vidéo d'installation sur thermometer.ch



Capteurs: unité de mesure radio de l'enregistreur de données

- Positionnés rapidement et simplement aux emplacements de mesure
- Avec certificat de calibration (valable pendant 2 ans)

Commande: thermomètre de Hediger Lab AG

pièce Unité principale (module passerelle) à 49.– CHF

pièce Capteur avec certificat (24 mois) à 235.– CHF

Commandez une unité principale et un capteur sous forme de paquet et bénéficiez en plus du prix préférentiel Zur Rose **de 10%** de remise supplémentaire sur les paquets.

Adresse de livraison

Adresse de livraison identique à l'adresse de facturation

Numéro client

Cabinet

Nom

Prénom

Rue / N°

NPA / Lieu

Téléphone

Adresse e-mail du cabinet

Adresse e-mail HIN

Adresse de facturation

Cabinet

Nom

Prénom

Rue / N°

NPA / Lieu

Date

Signature

L'offre et les prix sont valables exclusivement pour la clientèle Zur Rose.

Vous trouverez au verso le formulaire d'inscription pour l'eContrôle de température. →

Envoyez le formulaire dûment rempli à kundendienstaerzte@zurrose.ch ou inscrivez-vous en ligne.

zurrose.ch/econtrôle-de-temperature



Inscription à l'eContrôle de température

- Nous souhaitons utiliser l'eContrôle de température et vous fournissons les informations suivantes relatives à notre cabinet.

Informations sur le cabinet

Numéro client	Cabinet
Nom	Prénom
Rue / N°	NPA / Lieu
Téléphone	E-mail*

* Utilisé pour envoyer votre journal de température (quotidien/hebdomadaire).

- Oui, nous sommes d'accord pour que Zur Rose ait accès à nos données de température pour l'assistance.
- Je souhaite recevoir de plus amples informations sur les eServices de Zur Rose, par exemple le dépôt électronique des bulletins de livraison, que Zur Rose et BlueCare proposent conjointement.

Informations pour l'installation du service de température

Veillez toujours indiquer le(s) site(s). Autres informations à ne remplir que si des thermomètres du même type sont déjà disponibles dans le cabinet.

Login HIN		
N° d'enregistrement capteur 1*	N° de certificat	Site
N° d'enregistrement capteur 2*	N° de certificat	Site
N° d'enregistrement capteur 3*	N° de certificat	Site
N° d'enregistrement capteur 4*	N° de certificat	Site
N° d'enregistrement capteur 5*	N° de certificat	Site
N° d'enregistrement capteur 6*	N° de certificat	Site

* Vous trouverez le numéro d'enregistrement du capteur imprimé au dos de l'appareil, sous le code QR.

Cachet du cabinet	Date, signature
-------------------	-----------------

Nous sommes à votre disposition.

Vous souhaitez de plus amples informations?
Prenez rendez-vous dès maintenant pour un conseil:

au 0800 525 001 ou à l'adresse kundendienstaerzte@zurrose.ch.

Envoyez le formulaire dûment rempli à kundendienstaerzte@zurrose.ch ou inscrivez-vous en ligne.

zurrose.ch/econtrôle-de-temperature

